

## Подробная инструкция

### Arde Cave

Материал для временного пломбирования, самоотверждающийся. Готов к использованию. Arde Cave гарантирует надежное пломбирование благодаря таким качествам: - быстрое затвердевание в полости - сильная адгезия к дентину - невероятно крепкая краевая сцепка - выдерживает большие жевательные нагрузки - не оказывает негативного действия на пульпу и десна. Применение: При помощи гладилки заполните влажную полость необходимым Вам количеством материала. Затвердевание начинается через несколько минут. Чтобы впоследствии облегчить процедуру изъятия временной пломбы, не следует полностью заполнять глубокие полости. При пломбировании с использованием вкладок, вносите материал без сильного давления. Для изъятия затвердевшей временной пломбы лучше всего подходит острый короткий зонд. С этой целью позиционируйте между дентином и пломбой. Побочные эффекты: В случае правильной подготовки и использования продукта, побочные эффекты не наблюдаются. Однако не стоит полностью исключать возможность местной дизастезии (расстройства чувствительности и вкуса). В случае констатации побочного эффекта (а также в случае сомнения в и ном), пожалуйста, предоставьте нам полное описание обстоятельств применения материала и сообщите о точных симптомах. Меры предосторожности: Обратите внимание на то, чтобы все инструкции и меры предосторожности при работе с материалом неукоснительно соблюдались. В том случае, если у пациента будут наблюдаться какие-либо нежелательные реакции или произойдет какой-либо другой нежелательный инцидент при соблюдении всех необходимых предписаний, пожалуйста, предоставьте нам полное описание обстоятельств применения материала. Время хранения: Плотно закрывайте банку сразу после извлечения необходимого количества материала. Срок годности при хранении в закрытой упаковке: см. на этикетке. Материал, после первого использования, может храниться в течение шести месяцев. Не храните в местах с температурой выше 25 гр. по Цельсию. Не используйте материал по истечении срока годности. Состав: метакрилаты, акрилат-эфир, двуокись кремния и полимеры. Упаковка: флакон 30 г (белого или розового цвета) Сделано в Германии