

Подробная инструкция

Arde Lumine G.P.

Гель ARDE LUMINE G.P. представляет собой светоотверждаемый, полимерный, защитный материал («жидкий коффердам») для покрытия десен при отбеливании. Этот материал используется для того же, для чего используется и резиновый коффердам. А именно, для изоляции десен. Область применения: • Для закрытия десен в ходе отбеливания

Способ применения: Воспользуйтесь ретракторами для щек и губ. Язык и губы должны удерживаться в безопасном положении в течение всей процедуры отбеливания. Слизистая не должна контактировать с отбеливающим гелем. Долгий контакт приводит к ожогу, кратковременный - дает побеление десны, которое проходит в течение часа. Приготовьте шприц с материалом. Снимите закрывающий колпачок и на его место установите канюлю - аппликатор. Перед нанесением необходимо высушить десну. Гель имеет белый или голубой цвет и его легко визуально контролировать. Медленно, несильно нажимая на поршень шприца, нанесите его тонким слоем на слизистую. Материал должен слегка закрывать шейки зубов и входить в межзубное пространство. После использования шприца оттяните поршень немного назад. Отверждайте в течение 10 - 15 сек. с помощью стандартной лампы для светоотверждения композитов. Не держите лампу направленной слишком долго на одну и ту же зону, чтобы не перегреть слизистую и зубы. Гель твердеет и надежно закрывает десну. Теперь можно наносить отбеливающий материал. После процедуры отбеливания снимите затвердевший гель ARDE LUMINE G.P., подцепив материал с одного конца с помощью зонда. Удалите его. Снимите наконечник-аппликатор и установите вместо него закрывающий колпачок. Другие условия: ARDE LUMINE G.P. не следует использовать после истечения срока годности. Храните материал ARDE LUMINE G.P. в темном месте. Избегайте воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Данный материал содержит диметакрилат и им не следует пользоваться в случаях, при которых известно об аллергии или непереносимости данного типа материала. Упаковка: шприц 3 мл