

Подробная инструкция

Arde Seal

Светоотверждаемый текучий композит для герметизации фиссур и пломбирования небольших полостей (белого и прозрачного цветов). Arde Seal содержит ионы фтора для торможения развития кариеса. Белый цвет Arde Seal позволяет Вам лучше следить за плотностью краевого прилегания. Прозрачный цвет материала позволяет легко контролировать дно и стенки герметизированной фиссуры. Также Arde Seal используется с целью герметизации пломб из композитов или цементов и для облицовки поврежденной поверхности эмали. Применение

- 1.тщательно очистите рабочую поверхность и нанесите травильный гель (ортофосфорную кислоту). Голубой цвет способствует точному и аккуратному нанесению геля. Протравливание должно длиться 60 сек. Сократите время протравливания эмали молодых людей до приблизительно 30 сек., и продлите до приблизительно 120 сек для эмали с повышенным содержанием фтора. Следуйте инструкциям производителя травильного геля. после протравливания тщательно промойте поверхность большим количеством воды и просушите. Протравленная эмаль должна приобрести молочно-белый оттенок. После просушивания избегайте попадания на рабочую поверхность жидкости.
- 2.выдавите одну каплю Arde Seal на блокнот и с помощью аппликатора нанесите материал тонким слоем на протравленную поверхность тонким слоем. засветите галогеновой лампой 20-30 сек.
- 3.после использования тщательно закройте шприц. Побочные эффекты При правильном использовании материала побочные эффекты возникают крайне редко.

Противопоказания Запрещено использовать материал, если у пациента аллергия на акрилаты. При использовании материала соблюдайте инструкцию. Состав: содержит BIS-GMA, диуретан-диметакрилат, ВНТ, бензотриазолдериват Упаковка: шприц 2 мл (2.5 г)