

Инструкция
C-BOND
С-БОНД

Светоотверждаемый стоматологический адгезивный материал

1. Обозначение и описание медицинского продукта

С-Бонд

Светоотверждаемый стоматологический адгезив

2. Состав

2,2-бис-4(2 гидроокись – 3 – метакрилак-профилокс) фенил-пропан

2,2-бис-4(2-метакрилокс-этокси) фенил-пропан

3,6 диоксаоктаметилэндиметокрилат

3. Показания

В качестве стоматологического адгезивного материала (бондинга) для адгезивных реставрационных работ при технике протравления эмали, как средство нанесения схватывающего материала для ремонта пластмассы, керамики, коронок и мостов.

4. Побочные явления

До сих пор не обнаружено.

5. Взаимодействия с другими материалами

С-Бонд нельзя использовать вместе с прокладками, содержащими эвгенол, так как фенол препятствует полимеризации.

6. Внимание!

С-Бонд светочувствителен к синему цвету, так что полимеризация начинается уже при попадании дневного света или соответственно света от светильника на рабочем месте. (Фильтры синего света могут существенно замедлить данный процесс).

Поэтому светоотверждаемые материалы не следует без необходимости подвергать воздействию света (брать из флакона только непосредственно перед нанесением, немедленно закрывать флакон после использования).

7. Способ применения

После подготовки полости и протравливания эмали или соответственно поверхности эмали и дентина после того, как промыли водой, следует тщательно просушить.

В заключении на протравленную поверхность эмали и на внутренние поверхности полости наносится С-Бонд. Для этого 1-2 капли С-Бонда нанести кисточкой или маленькой губкой, а затем сразу же просушить воздухом, не содержащим масло.

Следует рекомендовать также производить и отверждение С-Бонда, однако это не обязательно. Отверждение осуществляется с помощью имеющегося в продаже источника синего света, например Мегалюкс SC. Время освещения составляет 10 – 20 сек. Следует обязательно избегать контаминации поверхности С-Бонда. Полость можно пломбировать только с помощью светоотверждаемого композита. Следует также рекомендовать в заключении запечатывать пломбу с помощью С-Бонда, так как благодаря этому закрываются микропоры и зазоры.

8. Срок хранения

3 года

9. Особые указания по складированию и хранению

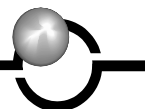
Рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +5С до +8С, однако не выше +25С.

9. Вид и размер упаковки

Флакон на 3,0 мл в отдельной упаковке и как составная часть упаковки в сортименте.

10. Время подачи информации

Ноябрь 2002 г.

**11. Название и адрес фирмы**

MEGADENTA Dentalprodukte GmbH
Carl-Eschebach-Strasse 1 A
D-01454 Radeberg, Germany
Tel. +49(0)3528 530 / www.megadenta.de

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ КАЧЕСТВА

Мы, Мегадента Денталпродукте ГмбХ, 01454 Радеберг, заявляем под свою собственную ответственностью, что продукт

С-Бонд,

Материал для пломбировки зубов, класса II а
соответствует основным требованиям приложения 1 инструкций 93\42 EWG.

Радеберг, 06.11.2002

Мегадента Денталпродукте ГмбХ

Подпись господина доктора М.Ноймана