

Перед применением внимательно прочитайте инструкции

RU

GC MI Paste Plus

Крем для поверхностного применения с биосовместимым кальцием, фосфатами и фтором

Для применения только профессиональными стоматологами в соответствии с рекомендованными показаниями.

ОПИСАНИЕ

GC MI Paste Plus – крем на основе воды, в состав которого входит Recaldent™* CPP-ACP (казеин фосфо пептид - аморфный фосфат кальция). Уровень фторовыделения 0,2% (900ppm), практически как в пасте для укрепления зубов. CPP-ACP, попадая в среду полости рта, связывается с биопленкой, налетом, гидроксиапатитом и мягкими тканям, доставляет активный кальций, фосфат и фтор. Не содержит лактозы.

ВАЖНО

Слюна увеличит эффективность CPP-ACP, а ароматическая добавка поможет стимулировать слюноотделение. Чем дольше слюна и CPP-ACP находятся во рту, тем более эффективным будет результат.

Крем для поверхностного применения, содержащий активные кальций, фосфат и фтор.

1. Обеспечивает повышенную защиту зубов.
2. Помогает нейтрализовать кислотное воздействие бактерий, находящихся в зубном налете.
3. Помогает нейтрализовать кислотное воздействие других внешних и внутренних источников.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Recaldent™* CPP-ACP получают из молочного казеина. Если пациент имеет аллергию на молочные протеины применение материала запрещено.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Профессиональное применение
2. Сразу же после клинического отбеливания.
3. После ультразвуковой или ручной профилактической чистки или обработки цемента корня.
4. После профессиональной чистки зубов.
5. Предотвращение и контроль гиперчувствительности.
6. Альтернативный способ фторирования детям от 6 лет.
7. Во время ортодонтического лечения.
8. Пациенты с высокой предрасположенностью к кариесу.
9. Обеспечение защиты поверхности тканей зуба у пациентов, страдающих эрозией, ксеростомией и синдромом Шегрена.
10. Пациенты со специальными потребностями.

Применение с индивидуальной ложкой

1. Перед использованием, тщательно промойте индивидуальную ложку проточной водой.
2. Выдавите толстый слой GC MI Paste Plus в ложку и установите на нижнюю или верхнюю челюсть.
3. Удерживайте неподвижно ложку во рту не менее 3 минут.
4. Извлеките ложку.
5. Попросите пациента размазать языком оставшийся на зубах GC MI Paste Plus по всему рту. Попросите пациента как можно дольше (1-2 минуты) воздержаться от отхаркивания и глотания. Чем дольше слюна и GC MI Paste Plus находятся во рту, тем эффективнее будет результат.
6. Попросите пациента сплюнуть и по возможности не поласкайте ему рот. Остатки GC MI Paste Plus можно оставить и они постепенно растворятся. Посоветуйте пациенту воздержаться от приема пищи и напитков 30 минут после применения.
7. Остатки GC MI Paste Plus следует смыть (с помощью щетки) проточной водой из ложки сразу же после применения.

Применение без ложки

1. Если необходимо, ватным шариком удалите любые излишки слюны с поверхности зубов. Однако, не обязательно сушить зубы воздухом.
2. Используя аппликационную щеточку, при помощи пальца (в перчатке) или зубной щетки для чистки труднодоступных аппроксимальных поверхностей нанесите на поверхность зуба толстый слой GC MI Paste Plus.
3. Оставьте GC MI Paste Plus на зубах на срок не менее 3 минут.
4. Попросите пациента размазать языком весь оставшийся GC MI Paste Plus по всему рту. Попросите пациента как можно дольше (1-2 минуты) воздержаться от отхаркивания и глотания. Чем дольше слюна и GC MI Paste Plus находятся во рту, тем эффективнее будет результат.
5. Попросите пациента сплюнуть и по возможности не поласкайте ему рот. Остатки GC MI Paste Plus можно оставить и они постепенно растворятся. Посоветуйте пациенту воздержаться от приема пищи и напитков 30 минут после применения.

Домашнее применение

1. Используя аппликационную щеточку, при помощи пальца (в перчатке) или зубной щетки для чистки труднодоступных аппроксимальных поверхностей нанесите на поверхность зуба толстый слой GC MI Paste Plus.
2. Оставьте GC MI Paste Plus на зубах на срок не менее 3 минут.
3. Размажьте языком весь оставшийся GC MI Paste Plus по всему рту. Как можно дольше (1-2 минуты) воздерживайтесь от отхаркивания и глотания. Чем дольше слюна и GC MI Paste Plus находятся во рту, тем эффективнее будет результат.
4. Сплюньте и по возможности не поласкайте рот. Остатки GC MI Paste Plus можно оставить и они постепенно растворятся в течение ночи. Воздержитесь от приема пищи и напитков 30 минут после применения.

Применение на ночь

Замечание:

Использование ночью рекомендовано для взрослых пациентов с высокой предрасположенностью к кариесу, но не рекомендовано детям до 12 лет.

1. Используя аппликационную щеточку, при помощи пальца (в перчатке) или зубной щетки для чистки труднодоступных апроксимальных поверхностей нанесите на поверхность зуба толстый слой GC MI Paste Plus.
2. Оставьте GC MI Paste Plus на зубах на срок не менее 3 минут.
3. Размажьте языком весь оставшийся GC MI Paste Plus по всему рту. Как можно дольше (1-2 минуты) воздерживайтесь от отхаркивания и глотания. Чем дольше слюна и GC MI Paste Plus находятся во рту, тем эффективнее будет результат.
4. Сплюньте и по возможности не полощите рот. Остатки GC MI Paste Plus можно оставить и они постепенно растворятся в течение ночи. Воздержитесь от приема пищи и напитков 30 минут после применения.

АРОМАТЫ

Клубника (S), Дыня (M), Ваниль (V), Мята (I), Фруктовый Tutti-Frutti (T)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте. Температура 8-25°C.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

(Срок годности: 2 года от даты производства)

УПАКОВКА

Туба 40 г (35 мл)

ПРИМЕЧАНИЕ

Имеющий в своем составе уникальное соединение Recaldent™* CPP-ACP, GC MI Paste Plus была разработана The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia.

Recaldent™ является торговой маркой и используется по лицензии Recaldent Pty. Ltd.

Технология CPP-ACP запатентована в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Канаде и США.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Всегда после применения закрывайте тубу колпачком и удаляйте остатки пасты с горлышка тубы.
2. Не рекомендуется использовать GC MI Paste Plus детям до 6 лет
3. Нанесение на ночь не рекомендовано детям до 12 лет
4. В случае попадания в глаза, промойте водой и обратитесь к врачу.
5. В случае попадания на одежду, смойте водой.
6. Если наблюдаются ангиообластические симптомы, это может означать наличие чувствительности или аллергии на консерванты бензоатного происхождения,

или другие компоненты продукта, такие как вкусовой агент. В этом случае, прекратите использование препарата и обратитесь к врачу.

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Research-Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

0086