

МЕТАРЕХ
ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ С ЙОДОФОРМОМ

**ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ С
ВЕЛИКОЛЕПНОЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬЮ И МОЩНЫМ
БАКТЕРИЦИДНЫМ ЭФФЕКТОМ**

Производитель: META BIOMED Co., Ltd., Корея

ПОКАЗАНИЯ

1. При случайном вскрытие пульпы и при пульпотомии.
2. При негерметичности канала.
3. При инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах.
4. При апексфиксации.
5. При формировании защитного твёрдотканевого барьера.
6. При перфорациях, оссификации, в областях резорбции костной ткани.
7. При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и периодонтитах.
8. Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Великолепная рентгеноконтрастность.
- Превосходный антибактериальный эффект. Йодоформ значительно усиливает бактерицидный эффект. Ph-12.5 (не опускается ниже 12 даже через 9 дней после первичного введения в канал). После введения, очаг воспаления становится практически полностью стерильным через 48 часов. Гибнет до 99% патогенной микрофлоры.

- Готовая паста Metapex, приготовленная на нерастворимой силиконовой основе для постоянного пломбирования каналов, в шприце.
- Легкое введение пасты в корневой канал. При необходимости – легко извлекается из канала.
- Одноразовые насадки для предотвращения перекрестной инфекции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. После препарирования корневого канала очистите и просушите канал.
2. Используйте вращающееся кольцо для лёгкого изменения направления наконечника.
3. Введите одноразовый наконечник в корневой канал.
4. Полностью заполните канал, выдавливая материал из шприца и постепенно выводя наконечник из канала.
5. Удалите излишек пасты Metapex с помощью стерильного ватного валика.
6. Снимите уже использованный наконечник, наденьте новый и зафиксируйте его с помощью фиксирующего кольца, а потом закройте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. При пломбировке нельзя выходить за апекс.
2. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.
3. Держите шприц закрытым.
4. Храните в сухом прохладном месте.
5. Срок годности 2 года.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2,2 г пасты в шприце.
- Одноразовые наконечники.
- Одно вращающееся кольцо для контроля направления наконечника.
- Вес – 83 г